

# Kurzbedienungsanleitung

Dies ist eine verkürzte Handhabungsanleitung zum **DoubleStar™ 300 Einheiten/ml.**


Die Doseinstellung bei Ihrem DoubleStar™ erfolgt in Schritten von 2 Einheiten.



Nur mit geeigneten Nadeln von Becton Dickinson and Company (BD), Ypsomed, Artsana oder Owen Mumford verwenden. Fragen Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Ihr medizinisches Fachpersonal, welche Nadeln geeignet sind.

**1**

**1 Stunde**  
vor erster  
Anwendung




DoubleStar™ 300 Einheiten/ml eine Stunde vor der ersten Injektion aus dem Kühlschrank nehmen.

**2**




Hände waschen und Injektionsstelle reinigen. Insulin und Verfallsdatum prüfen.

**3**

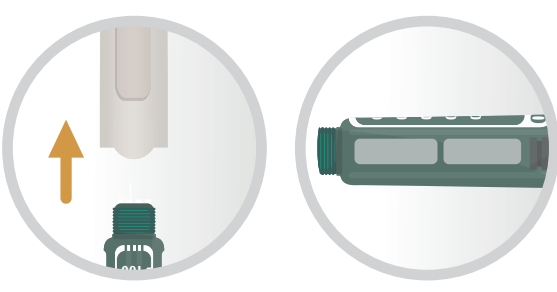


Penkappe entfernen und prüfen, ob Insulinlösung klar ist.

**4**

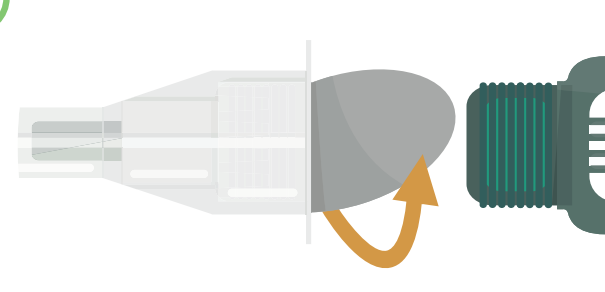


Schutzfolie von Nadelkappe entfernen.

**5**

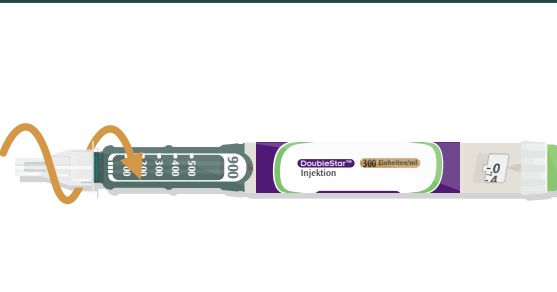

Nadel gerade auf den Pen schrauben.

**6**



Äußere Nadelkappe abziehen und aufbewahren.

**7**



Innere Nadelkappe abziehen und entsorgen.

**8**



Sicherheitstest durchführen. Dosiererring auf 4 Einheiten stellen.

**9**

Injektionsknopf drücken, bis Insulin austritt.

**10**

Falls kein Insulin austritt, Sicherheitstest bis zu sechsmal wiederholen.

**11** Die Dosiseinstellung bei Ihrem DoubleStar™ erfolgt in Schritten von 2 Einheiten.

Beispiel eingestellte Dosis: 40 Einheiten

Dosiererring drehen, bis gewünschte Dosis angezeigt wird.

**12**

Pen im 90-Grad-Winkel in Haut stechen.

**13**

Daumen gerade auf Injektionsknopf legen und dann drücken.

**14**

Injektionsknopf gedrückt halten. Wenn „0“ angezeigt wird, langsam bis 5 zählen.

**15**

Äußere Nadelkappe auf Nadel setzen und vom Pen abdrehen.

**16**

DoubleStar™ 300 Einheiten/ml bei Raumtemperatur (unter 30 Grad) aufbewahren.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsinformation, die jeder Packung DoubleStar™ 300 Einheiten/ml beiliegt.

Ihr ServiceCenter Diabetes  
**0800 52 52 010**  
 (gebührenfrei aus dem  
 dt. Fest- und Mobilfunknetz)  
[servicecenter-diabetes@sanofi.com](mailto:servicecenter-diabetes@sanofi.com)

Weitere Informationen finden  
 Sie unter [diabetes.sanofi.de](http://diabetes.sanofi.de)

